

CD-2900

Urządzenie do ultradźwiękowego czyszczenia soczewek kontaktowych.

Opatentowana technologia.

- Lider chińskiego rynku urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego.
- Rewolucyjny produkt do czyszczenia soczewek kontaktowych.
- Posiada atesty FCC (USA) i WE (Europa).
- Najnowszej generacji produkt do higieny oczu.
- Nowoczesna technologia ultradźwiękowego czyszczenia.
- Mały przetwornik piezoelektryczny dbający o precyzję czyszczenia.

Całkowity brak zanieczyszczeń.

Bezdotykowe czyszczenie soczewek kontaktowych gwarantujące brak infekcji.

Oszczędność czasu, bez konieczności całonocnego namaczania soczewek.

Usuwa proteiny i osady w 2 minuty.

Komfort porównywalny z używaniem nowych soczewek.

Dokładne czyszczenie metodą ultradźwiękową oferuje codzienny komfort zbliżony do użytkowania nowych soczewek.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Częstotliwość ultradźwiękowa: | 120 000 Hz |
| Czasomierz: | 2 min / 10 min, automatyczny stop |
| Zasilanie: | DC 12V, 5W |
| Zasilacz: | Prąd wyjściowy: DC 12V, 1A Prąd wejściowy: AC 100 – 240V, 50/60 Hz |
| Wymiary: | 110 x 70 x 50 mm (dł. x szer. x wys.) |
| Masa netto: | 0,22 kg |
| Masa brutto: | 0,40 kg |

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami:

- Zachować środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
1. Po zakończeniu użytkowania odłączyć urządzenie od źródła prądu.
 2. Nie używać w kąpieli.
 3. Urządzenie przechowywać w bezpiecznym miejscu, nie upuszczać do wody lub innych płynów.
 4. Nie zanurzać w wodzie lub innych płynach.
 5. Po upuszczeniu do wody nie dotykać produktu. Natychmiast odłączyć od źródła zasilania.

Uwaga: Podjąć środki bezpieczeństwa przeciwko pożarowi i uszkodzeniom ciała.

1. Urządzenia używać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie stosować akcesoriów niezalecanych przez producenta.
2. Nigdy nie używać niniejszego urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka noszą ślady uszkodzeń, nie pracuje ono prawidłowo lub zostało uszkodzone lub upuszczone do wody. W takim wypadku użytkownik powinien naprawić lub wymienić urządzenie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
3. Nie oddalać się od włączonego urządzenia.
4. Trzymać z dala od dzieci.
5. Przechowywać na płaskiej powierzchni w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
6. Nie używać podczas snu.

WSTĘP

Tradycyjne czyszczenie soczewek kontaktowych polega na zanurzeniu ich w roztworze płynu, czyszczącego, który stopniowo rozpuszcza osady proteinowe na powierzchni soczewek. Zwykle proces czyszczenia trwa to od 6 do 8 godzin.

Aby całkowicie usunąć osady proteinowe w czasie 2 minut, a tym samym efektywnie chronić soczewkę przed uszkodzeniami, nasz produkt wykorzystuje technologię ultradźwiękową o specjalnej, wysokiej częstotliwości (150 KHz).

UWAGA

| | |
|--|--|
| Do zbiorniczka nie należy wlewać żadnych substancji chemicznych poza płynem do czyszczenia soczewek, roztworem soli fizjologicznej i oczyszczoną wodą. | Nie należy przepełniać zbiorniczka. |
| Nie używać urządzenia, gdy nie jest napełnione wodą. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia. | Aby zachować czystość zbiorniczka urządzenia, nie należy wykorzystywać go do czyszczenia innych artykułów. |
| Nie używać wody wodociągowej do płukania urządzenia. Może to prowadzić do uszkodzeń i zatorów. | W przypadku nieregularnej lub zaburzonej pracy zatrzymać urządzenie. Osoby bez przygotowania technicznego nie powinny demontować obudowy urządzenia. |
| Powtórne czyszczenie w krótkich odstępach czasu może uszkodzić lub osłabić niektóre rodzaje soczewek kontaktowych. Może to prowadzić do zagrożenia i uszkodzenia oczu. | |

**URZĄDZENIE DO ULTRADŹWIĘKOWEGO CZYSZCZENIA SOCZEWEK
KONTAKTOWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI**

Zasilacz AC

Gniazdo zasilania

Dioda sygnalizacyjna:

czyszczenie (kolor zielony)

ładowanie(kolor czerwony)

Wyłącznik

Przycisk wzmocnienia czyszczenia

Przycisk rozpoczęcia czyszczenia

Zbiorniczek

Koszyk na soczewki kontaktowe

Komora na prawą soczewkę kontaktową

Komora na lewą soczewkę kontaktową

Pokrywa

Pusty zbiornik na roztwór

Szczypczyki

INSTRUKCJA OBSŁUGI

| | |
|----------------------------|--|
| | 1. Umyć ręce. Ostrożnie zdjąć obudowę, aby rozpocząć czyszczenie. |
| | 2. Wyjąć koszyk na soczewki kontaktowe i przy użyciu szczypczyków umieścić lewą soczewkę kontaktową w komorze oznaczonej literą „L”, a prawą soczewkę w komorze oznaczonej literą „R”. |
| | 3. Napełnić urządzenie do górnej krawędzi zbiorniczka ze stali nierdzewnej roztworem płynu do czyszczenia soczewek. Nie należy przepełnić zbiorniczka. |
| | 4. Umieścić pokrywę z soczewkami z powrotem na urządzeniu. |
| | 5. Upewnić się, że zasilacz jest podłączony do urządzenia i gniazda zasilania. |
| | 6. Wcisnąć przycisk „CLEAN”. Zielone światelko sygnalizuje trwanie procesu czyszczenia. Po 2 minutach czyszczenia urządzenie samoczynnie się wyłączy (czyszczenie zakończone). |
| Pali się zielone światelko | Odgłosy syczenia dochodzące z urządzenia są normalnym zjawiskiem w czasie procesu czyszczenia. Oznaczają one, że czyszczenie jest w toku. |
| Przycisk czyszczenia | |

| | |
|--|---|
| | 2-minutowe czyszczenie wystarcza na cały dzień. |
| Powtórne czyszczenie w krótkich odstępach czasu może uszkodzić lub osłabić niektóre rodzaje soczewek kontaktowych. Może to prowadzić do zagrożenia i uszkodzenia oczu. | |

DOKŁADNE CZYSZCZENIE

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pali się czerwone światelko.</p> <p>Przycisk sterylizacji.</p> | <p>Soczewki należy poddawać dokładnemu czyszczeniu raz na tydzień.</p> <p>Wcisnąć <i>symbol przycisku nieczytelny</i>. Zapala się czerwone światelko sygnalizujące początek dokładnego czyszczenia. Urządzenie samoczynnie zatrzyma się po 5 minutach.</p> |
|---|--|

Przed dotykaniem soczewek kontaktowych lub wewnętrznych powierzchni urządzenia umyć ręce.

Do czyszczenia lub płukania soczewek kontaktowych nie należy używać wody wodociągowej. Do każdego czyszczenia używać świeżego roztworu płynu czyszczącego. Płynu używać tylko raz.

KONSERWACJA

1. Po zakończeniu używania niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania.
2. Po każdorazowym zakończeniu używania opróżnić zbiorniczek.
Nie trzymać pozostałości po czyszczeniu w zbiorniczku.
3. Wytrzeć zbiorniczek przy pomocy czystej, zwilżonej szmatki lub gazy i zawsze utrzymywać go w czystości.

Nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Może to prowadzić do uszkodzeń i zatorów.

4. Wyjąć koszyk na soczewki kontaktowe z urządzenia i opłukać go pod wodą.
5. Ponownie założyć go do urządzenia.
6. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.
7. Napraw i przeglądów dokonywać w autoryzowanym punkcie serwisowym.